



medDispense®

Alimenté par  
medLogic™

## Flexibilité. Sécurité. Efficacité.

Une plate-forme logicielle et d'innombrables configurations matérielles fonctionnent ensemble pour vous offrir une sécurité accrue et une automatisation plus efficace de votre flux de travail clinique.

La série medDispense® vous offre le contrôle et la souplesse nécessaires pour choisir la façon la plus efficace de ranger et de distribuer les médicaments en toute sécurité.



medDispense®	Série C	Série CS	Série CT	Série F	Série L	Série M	Série V
Espaces de Rangement	800	1 200	1 400	1 248	324	1 440 Standard 2 160 TG	720
Distribution monodose				✓		✓	
Rangement en vrac	✓	✓	✓				✓
Accès progressif aux tiroirs				✓		✓	
Technologie de guidage Pick-to-Light				✓	✓	✓	✓ *
Fabrication en acier				✓	✓		✓
Commande individualisée	✓		✓	✓	✓	✓	

\* La technologie Pick-to-Light n'est disponible que sur les portes avant en acier.

#### AVANTAGES CLÉS



Tiroirs progressifs monodoses



Évolutifs selon vos besoins



Protection antimicrobienne



Mise en file d'attente à distance des médicaments NurSync™



Une plate-forme logicielle sur tout le matériel



Nombreuses configurations d'entreposage sécurisé



Interfaçage HL7

## La valeur de medDispense®

La sécurité des médicaments et l'efficacité du flux de travail sont essentielles à la distribution des médicaments. medDispense® offre la plus large gamme de matériel de distribution interchangeable avec une seule plate-forme logicielle.

### Configurations modulaires.

Toutes les armoires medDispense® sont interchangeables, vous offrant le maximum de souplesse et de sécurité pour ranger vos articles en monodoses et en vrac.




### Évolue facilement en même temps que vos besoins en matière d'entreposage des médicaments

Toutes les armoires medDispense® fonctionnent ensemble pour vous offrir une solution sur mesure, adaptée à vos besoins changeants.



### Éliminez les contraintes d'espace avec toute une gamme de volumes d'entreposage.

Le meuble le plus petit a un encombrement de 545 mm (21,5 po) de largeur x 2 003 mm (78,6 po) de hauteur x 520 mm (20,5 po) de profondeur.

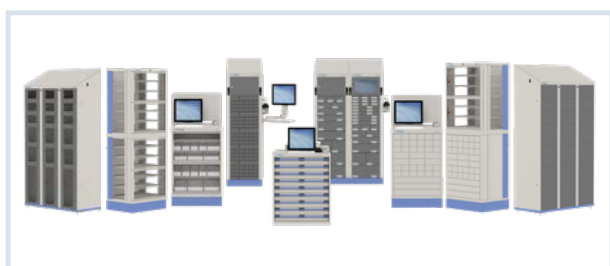

### Nombreuses configurations matérielles pour répondre à vos besoins

Combinez la distribution monodose haute sécurité avec le stockage en vrac, optimisés par medLogic™.



### Logiciel et matériel hautement configurables

Grâce à medLogic™, vous pouvez facilement configurer les paramètres utilisateur et les mesures de sécurité parallèlement à la disposition du matériel, vous offrant ainsi une grande souplesse.

## Distribution sécuritaire et sécurisée.

Réduisant le risque d'erreur dans la médication et offrant un rangement sécurisé, medDispense® met en place les bonnes protections pour chaque article que vous distribuez.



### Accès sur autorisation et rapports

- Les médicaments et les fournitures sont tous dans un milieu contrôlé, verrouillé et accessible seulement sur autorisation.
- Le module logiciel PharmacyCenter™ permet de voir et de contrôler l'inventaire à distance, depuis la pharmacie.
- Accordez aux utilisateurs des droits individuels pour l'accès aux fonctions.



### Rangement sous haute sécurité des médicaments réglementés

- Distribution monodose par tiroirs en acier à accès progressif (conformes à la réglementation britannique sur la base de données relative aux soins d'urgence).
- Double signature facultative pour le retrait, le rejet, le retour ou le remplacement.
- Suivi et notification des divergences.
- Le module de gestion des médicaments réglementés medGuard™ constitue une boucle fermée.



### Planification et soutien

- Notre équipe de services professionnels travaille en étroite collaboration avec vous pour que l'emplacement des médicaments et les niveaux de sécurité soient optimisés pour votre établissement.
- Interfaces personnalisées par notre équipe de services professionnels.
- Soutien technique permanent tout au long de la vie de votre équipement.



### Protection logicielle


- medLogic™ contrôle toutes les armoires medDispense® avec des dispositifs de protection intégrés, comme la recherche configurable de médicaments.
- Le logiciel medGuard™ pour la gestion de l'inventaire des médicaments réglementés permet un réapprovisionnement en boucle fermée.
- Autres protections logicielles :
  - Alertes aux risques d'allergie, alertes aux doubles prises de médicaments, balayage de codes à barres, alertes aux médicaments à présentation et à consonance semblables, écriture en lettres majuscules de certaines sections des noms de médicaments.

## Effacité du flux de travail.


Grâce à medLogic™, vous pouvez travailler plus intelligemment sans travailler plus DUR. Des modules logiciels comme NurSync™ et PharmacyCenter™ vous aident à gagner en efficacité dans votre flux de travail.



NurSync™ – Menu principal

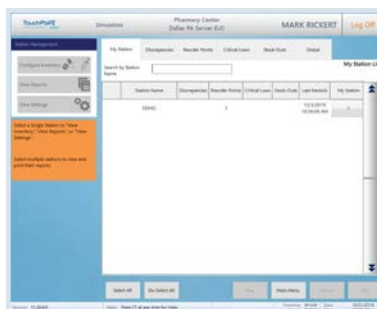

PharmacyCenter™ – Gestion de station

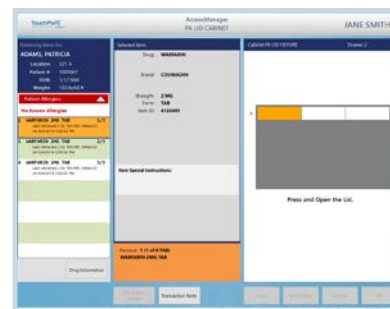

medLogic™ – Retrait d'article

### Mise en file d'attente à distance des médicaments

Maximisez le temps passé avec les malades et minimisez le temps passé aux armoires à distribution automatique grâce au système de mise en file d'attente à distance des médicaments NurSync™, et ce depuis votre poste de travail AccessRx MD™.

### Meilleure visibilité de l'inventaire dans toutes les armoires medDispense®

Gérez rapidement et facilement les stocks et réduisez les ruptures de stock dans toutes les armoires medDispense® grâce au module PharmacyCenter™.

### Interface utilisateur intuitive

Les données du malade sont consultables par l'interface HL7. L'interface utilisateur facile à naviguer réduit le temps passé sur l'armoire de distribution automatique.



AccessRx MD™

# medLogic™

Un continuum complet de matériels et de logiciels intégrés permettant un rangement, une distribution et un transport sécurisés et efficaces des médicaments.



## medLogic™ – Avantages.

La plate-forme logicielle medLogic™ offre à votre équipe une efficacité et une souplesse accrues, et aux malades un milieu plus sécuritaire.



### EFFICACITÉ

#### Distribution d'un seul médicament sur plusieurs sites

- La distribution d'un seul médicament peut s'étendre sur plusieurs sites et plusieurs armoires medDispense®, permettant une distribution plus rapide et plus de temps avec le malade.

#### Rangement par code à barres

- Réapprovisionnement plus rapide par le clic d'un bouton.
- Éliminez le temps passé à taper, rechercher et sélectionner à l'écran.

#### Stockage selon la règle du premier entré, premier sorti

- medLogic™ trouve et distribue le médicament le plus ancien au stock, suivi du médicament qui le précède directement, et ainsi de suite, facilitant la rotation des stocks.
- Réduction du nombre de médicaments qui expirent avant leur consommation et de leur coût.



### SÉCURITÉ

#### Compatibilité complète avec la base de données sur les soins d'urgence (ECD) du NHS britannique

- Prise en charge du flux de travail de l'ECD et consignation des opérations.
- Rapport de solde de stock.

#### Production de rapports de stock à la demande par article ou médicament.

- Production de rapports de réapprovisionnement en un clic

#### Recherche de médicaments configurable

- Aide à réduire les erreurs de distribution grâce à une recherche de médicaments configurable à quatre caractères.

#### Stockage par numéro de lot

- Augmentez la traçabilité de vos médicaments, pour les retrouver plus facilement lorsque vous avez besoin de savoir où ils se trouvent.



### SOUPLESSE

#### Stockage et distribution de doses fractionnées

- Les fonctions de distribution, de retour et de rejet prennent en charge les valeurs décimales.
- Réduire le gaspillage de médicaments.

#### Affichage haute définition 16:9 et écran d'ordinateur portable

- Options d'affichage désormais plus flexibles pour les modules PharmacyCenter™ et NurSync™.

L'interface de medLogic™ est conviviale et facile à utiliser, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur les soins aux malades.



Le système sécurise et surveille vos médicaments et vos fournitures tout en s'intégrant de manière transparente à tout système d'information hospitalier.



Les modules de medLogic™ améliorent l'efficacité, la sécurité et la visibilité du flux de travail, vous permettant de gagner du temps et de vous concentrer sur la prestation de soins exceptionnels aux malades.



### NurSync™

Mise en file d'attente à distance des médicaments



### medGuard™

Gestion du stock de médicaments réglementés




### PharmacyCenter™

Rapports et administration du système

# NurSync™

Le module NurSync™ permet au personnel infirmier de réduire le temps passé au poste de distribution et d'augmenter le temps passé avec les malades.

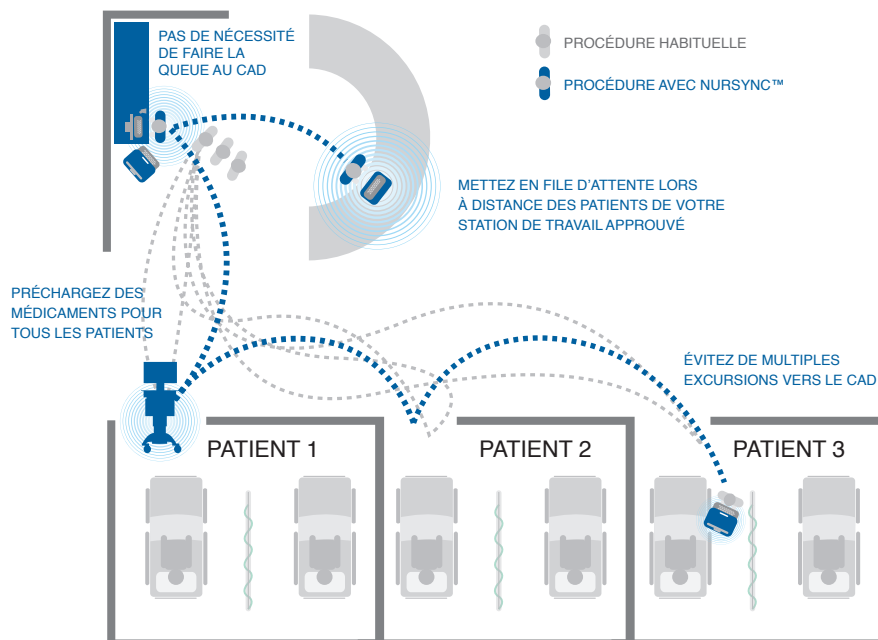

NurSync™ permet au personnel infirmier de créer des files d'attente de médicaments pour leurs patients, de manière à réduire les temps de récupération des médicaments, à créer un flux de travail plus efficace et à passer plus de temps avec les malades.

## Facile comme 1 - 2 - 3

- 1 Installez le module NurSync™ sur un ordinateur affecté à l'armoire de distribution automatique, comme votre poste de travail AccessPoint™.
- 2 Connectez-vous pour créer, gérer et supprimer les files d'attente de médicaments du malade.
- 3 Lorsque vous êtes prêt, allez à l'armoire medDispense® et prenez les articles qui se trouvent dans votre file d'attente.




Distribuez vos médicaments

# medGuard™

Le module medGuard™ permet aux établissements de stocker les médicaments réglementés et d'en faire le suivi de manière à garantir un réapprovisionnement en boucle fermée.



medGuard™ – Menu principal

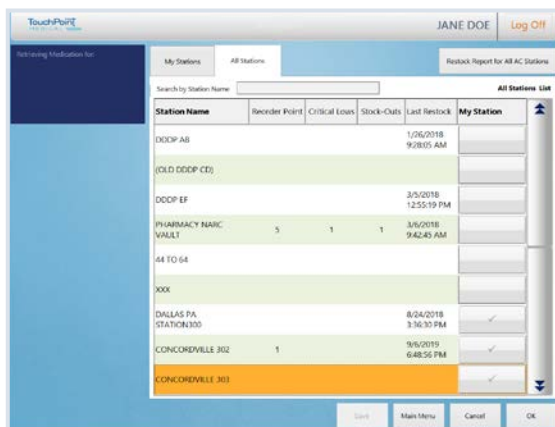


medGuard™ – Menu de sélection des médicaments

## Assurez-vous que les médicaments réglementés vont à leur armoire medDispense®

- Aide à fermer la boucle de la distribution des médicaments et à surveiller les détournements potentiels avec un accès contrôlé au réapprovisionnement et aux protections logicielles.
- Le suivi des anomalies garantit que la quantité récupérée et enregistrée dans medGuard™ correspond à la quantité stockée dans l'armoire medDispense®.
- Le compte optionnel de fin de poste avec medGuard™ garantit une traçabilité supplémentaire.

## Visualisez facilement l'inventaire des médicaments réglementés que contiennent vos armoires medDispense®

- Créez des rapports de réapprovisionnement en médicaments réglementés pour toutes les armoires.
- Contrôlez la visibilité de l'armoire en personnalisant l'accès des utilisateurs.
- Les rapports Global Item Locator et Global Inventory vous renseignent instantanément sur la quantité de médicaments contrôlées que vous avez dans votre établissement et leur emplacement.
- Indicateurs clairs de l'état des approvisionnements à chaque armoire medDispense®.

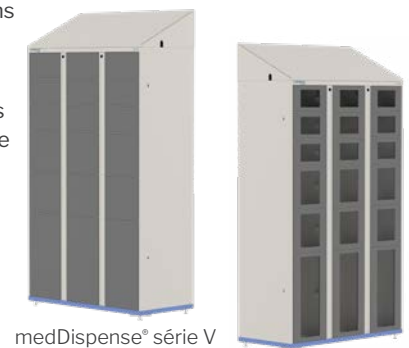

medDispense® série V

### Compatibilité matérielle

medGuard™ peut être installé sur n'importe quel matériel. medDispense® série V est particulièrement recommandée pour ses compartiments de stockage configurables.

# PharmacyCenter™

Le module PharmacyCenter™ permet au personnel de la pharmacie de gérer leurs médicaments sur plusieurs armoires medDispense® grâce à un tableau de bord et un système de création de rapports faciles à utiliser.




PharmacyCenter™ – Menu principal

## PharmacyCenter™ – Avantages

- ✓ Créer des rapports
- ✓ Configurer l'inventaire
- ✓ Voir les anomalies
- ✓ Maintenance opérateur
- ✓ Repérer les articles proches de la rupture de stock
- ✓ Repérer les articles en rupture de stock
- ✓ Configurer les paramètres de l'armoire




Configurer l'inventaire

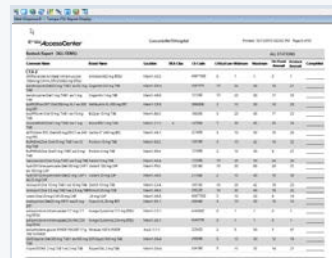

Réapprovisionner avec rapport de signature



Gérer les stations

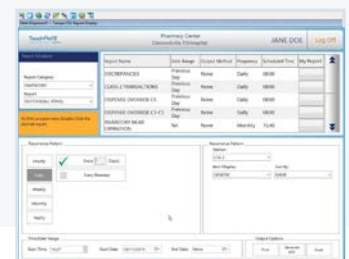

Planificateur de rapports

Le module PharmacyCenter™ vous permet de gérer et d'entretenir les armoires de distribution automatique de votre établissement depuis n'importe quel ordinateur.


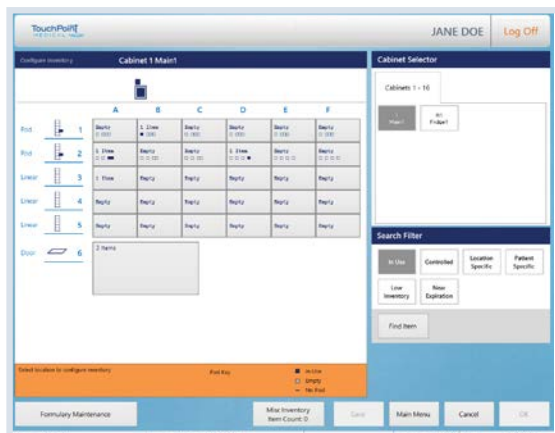


Tableau de bord de gestion des stocks

### Visibilité et gestion de votre inventaire dans toutes les armoires

- Visibilité sur le compartiment auquel un médicament est ajouté.
- Ajoutez, supprimez ou modifiez un médicament dans l'armoire sélectionnée.
- Vérifiez les numéros d'article, les descriptions et définissez la classe de médicaments.
- Voyez les médicaments qui approchent de la rupture de stock, en rupture de stock et ceux qui ont expiré.
- Gérez les médicaments qui peuvent être remplacés.

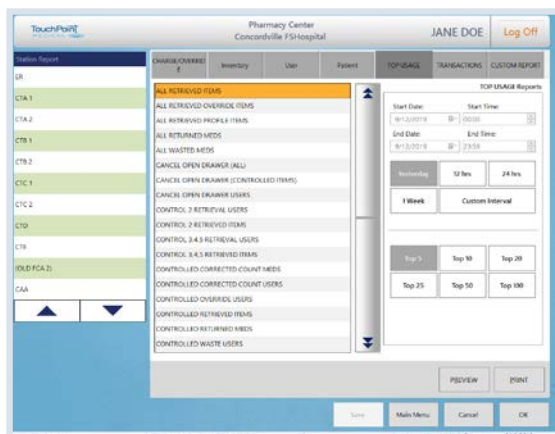



Rapport d'utilisation maximale

### Des rapports qui comptent

- Créez des rapports sur les indicateurs qui comptent pour votre établissement, comme l'inventaire, l'utilisation maximale, les opérations, les médicaments réglementés, etc.
- Choisissez les paramètres prédéfinis ou personnalisez-les.
- Acheminement programmé des rapports (impression, courrier électronique, télécopieur).
- Rapports à la demande et aperçu d'impression.
- Rapports ad hoc.


Capacité personnalisable – du contrôle par article au stockage en vrac haute capacité.

medDispense®  
C series

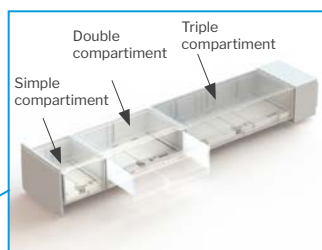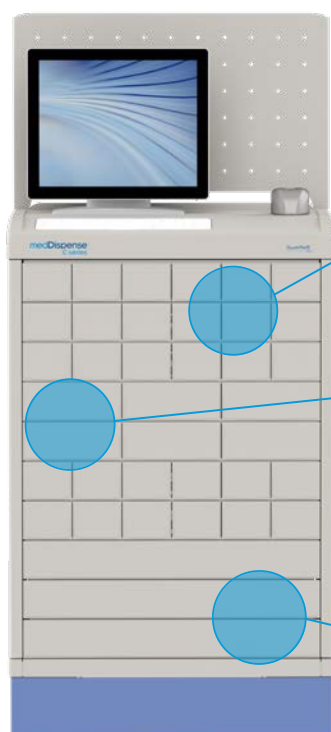


#### Tiroirs compartimentés

- Commande individualisée avec compartiments simples, doubles ou triples.

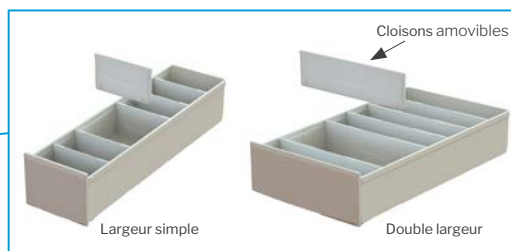

#### Tiroirs à disposition linéaire

- Tiroirs linéaires à largeur simple ou double.

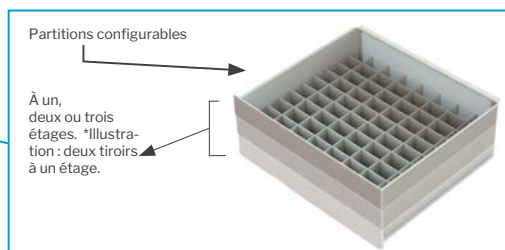

#### Tiroirs matriciels

- Tiroirs matriciels à un, deux ou trois étages.

La série C de medDispense® s'intègre avec les séries :

CS, CT, F, L, M et V.

**Stockage en vrac dans un cadre plus petit**

- Les articles en vrac et les articles volumineux peuvent être stockés et distribués en toute sécurité.
- Plusieurs corbeilles pour chaque article.
- Toutes les zones de stockage en vrac de la série C viennent avec des préférences d'éclairage pour une identification facile des articles.



**Contrôle simultané d'articles individuels et d'articles en vrac**

- Plusieurs configurations de tiroirs, y compris le contrôle d'articles individuels et le stockage en vrac.
- Zone de stockage en vrac éclairée.



**medDispense® Accessoires**

- Les bacs de stockage sont disponibles en plusieurs tailles. Liste complète à la page 34.

**La plus petite armoire medDispense®**

- Idéale pour les zones où le volume de stockage demandé est petit.
- Capacité maximale de 112 unités.
- L'unité compacte de comptoir peut s'installer pratiquement n'importe où.



Protection antimicrobienne

Ajoutez une capacité supplémentaire pour sécuriser l'approvisionnement en vrac et celui des gros articles.

**medDispense**<sup>®</sup>  
CS series



Série CS avec devant transparent



Série CS avec devant en acier

#### Sécurisez les articles en vrac et les articles volumineux

- Bacs et emplacements configurables pour articles en vrac.
- Toutes les zones de stockage en vrac de la série CS ont des préférences d'éclairage pour une identification facile.
- Les portes en acier renforcent la confidentialité et la sécurité.
- Profondeurs complètes ou compactes.
- Combinez cela avec le logiciel medGuard™ pour sécuriser le stockage des substances réglementées.



Série CS demi-hauteur avec devant transparent

#### Plusieurs tailles pour s'adapter à vos besoins de stockage

- Les armoires série CS de taille réduite offrent sécurité et capacité dans une gamme de tailles.
- Profondeurs complètes ou compactes

La série CS de medDispense<sup>®</sup> s'intègre avec les séries :  
C, F, L et M.




Protection  
antimicrobienne



Développez votre capacité tout en combinant la sécurité des articles individuels et le stockage en vrac.

## medDispense® CT series

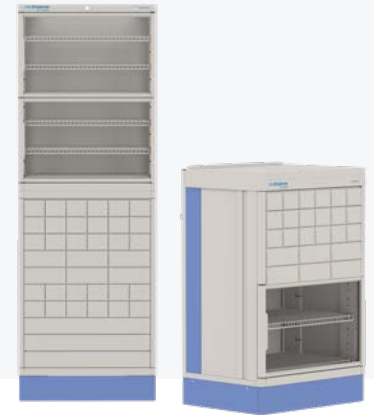


### Contrôle d'articles individuels et stockage en vrac

- Stockez jusqu'à 1 400 articles dans une tour.
- Plusieurs profondeurs qui répondent aux besoins de votre installation.
- Accès par autorisation aux articles en vrac.


### Tiroirs

- Mêmes options que la série C.

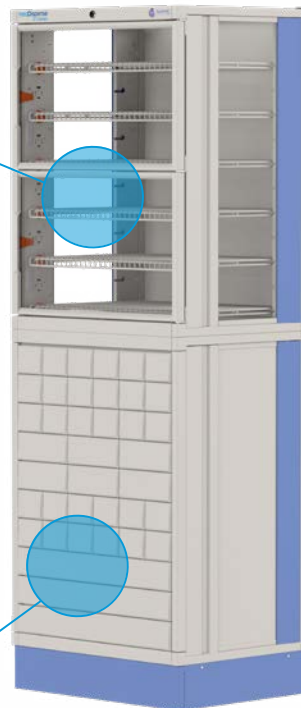

### Tiroirs et rayonnages configurables

- Tiroirs configurables, comme la série C, avec possibilité de stockage linéaire, matriciel et compartimenté.
- Toutes les zones de stockage en vrac de la série CT ont des préférences d'éclairage pour une identification facile des articles.

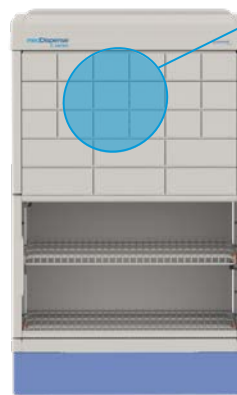


### Distribution depuis un volume de la taille de comptoir

- Idéale pour les petites surfaces de comptoir nécessitant une capacité supplémentaire.
- Capacité maximale de 112 unités.



### Augmentation de la capacité dans un encombrement réduit

- Distribuez jusqu'à 800 articles par unité.
- Choix de profondeur complète ou compacte.

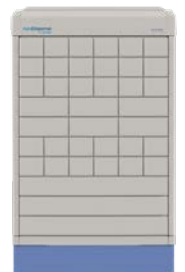


▶ La série CT de medDispense® s'intègre avec les séries :  
C, F, L et M.



Protection  
antimicrobienne


Le plus haut niveau de sécurité pour  
les monodoses, garantissant l'accès  
uniquement à la quantité nécessaire.

medDispense®  
F series

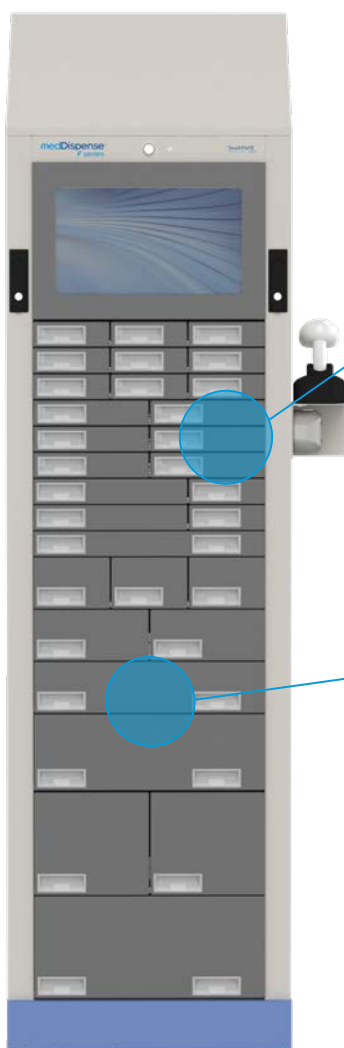

#### Distribution de médicaments la plus sécurisée

- Compartiments en acier à monodoses avec un maximum de 12 compartiments à tiroirs progressifs pour ne permettre l'accès qu'aux médicaments nécessaires.
- La construction en acier répond pleinement aux exigences du NHS en matière de médicaments réglementés.

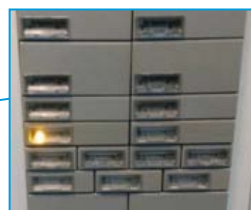

#### Technologie de distribution efficace

- La technologie Pick-to-Light permet de repérer et de distribuer les articles voulus plus facilement et plus rapidement.

#### Hautement configurable et extensible

- Tiroirs de 15 tailles différentes pour le niveau de sécurité et la taille d'articles souhaités.
- Trois modes de stockage : simple, mixte et linéaire.

La série F de medDispense® s'intègre avec les séries :  
C, CS, CT, L, M et V.



Protection  
antimicrobienne

Les compartiments mono-article accueillent des médicaments de toutes tailles qui nécessitent plus de sécurité que les compartiments ouverts.

**medDispense®**  
L series



**Accès sécurisé aux articles individuels**

- Les compartiments sont robustes, munis de serrures très résistantes impossibles à ouvrir de force.
- Pour plus de sécurité, les objets à l'intérieur des compartiments sont invisibles.
- La construction en acier répond pleinement aux exigences du NHS en matière de médicaments réglementés.



**Configurations haute capacité**

- Tiroirs à deux tailles (100 mm et 150 mm de profondeur) pour accueillir toute une gamme de médicaments.
- Compartiments plus grands que ceux de la série C.
- Compartiments à neuf tailles pour répondre à vos besoins.



**Repérage facile grâce à la technologie de guidage Pick-to-Light**

- Distribution rapide et efficace grâce à l'éclairage qui vous guide vers le bon tiroir et le bon compartiment.

▶ La série L de medDispense® s'intègre avec les séries :  
C, CS, CT, F, M et V.



Protection  
antimicrobienne


Capacité et sécurité élevées dans un  
faible encombrement.

medDispense®  
M series



**Bras d'écran réglable**

- Montage gauche ou droit.
- Réglage en hauteur.

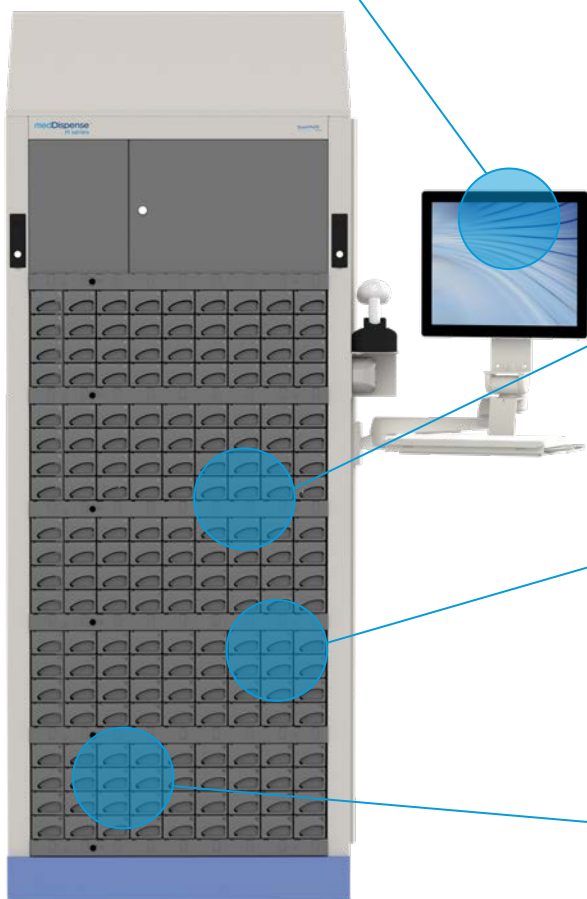

**Distribution de médicaments hautement sécurisée**

- Distribution monodose avec 12 emplacements dans un tiroir à ouverture progressive.
- La conception des compartiments permet une récupération en douceur de leur contenu.



**Facile à reconfigurer et à agrandir**

- Tiroirs de cinq tailles différentes pour le niveau de sécurité et la taille d'articles souhaités.



**Technologie de distribution efficace**

- La technologie Pick-to-Light permet de repérer et de distribuer les articles voulus plus facilement et plus rapidement.


La série M de medDispense® s'intègre avec les séries :  
C, CS, CT, F, L et V.



Protection  
antimicrobienne

## Stockage et traçabilité des médicaments en vrac et des fournitures.

medDispense®  
V series

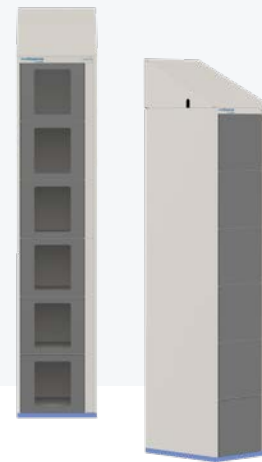

### Casiers configurables

- Trois tailles de porte au choix.
- Les articles sont facilement repérables par des portes ouvertes ou des lumières de guidage qui permettent un accès rapide et intuitif.

### Repérage facile et sécurisé

- Chaque casier possède son propre éclairage, permettant une très bonne visibilité des produits.



### Sécurité et confidentialité

- Structure en acier.
- Porte avant transparente ou en acier.

### Capacité de grand volume

- Neuf portes sécurisées par armoire.

### Idéale pour le stockage de substances réglementées par PharmacyCenter.

Conjuguée au module medGuard™, la série V constitue une solution en boucle fermée pour la gestion des médicaments réglementés.

▶ La série V de medDispense® s'intègre avec les séries :  
C, F, L et M.



Protection  
antimicrobienne

# Système medDispense®

## Série C



<b>Unité – Capacité Maximale</b>	112	700	800	600
<b>Unité – Dimensions</b>	<p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 668mm (26,25 po)*</p>	<p><b>Pleine profondeur :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711mm (28po) Hauteur: 1 550mm (61po) <b>Compact :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 588,8mm (22po) Hauteur: 1 550mm (61po)</p>	<p><b>Pleine profondeur :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711mm (28po) Hauteur: 1 550mm (61po) <b>Compact :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 588,8mm (22po) Hauteur: 1 550mm (61po)</p>	<p><b>Pleine profondeur :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711,2mm (28po) Hauteur: 1 550mm (61po) <b>Compact :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 588,8mm (22po) Hauteur: 1 550mm (61po)</p>
<b>Poids</b>	66-73kg 146-162lb	159,2-221,8kg 351-489lb	221,4-344,3kg 488-759lb	89,8-101,2kg 198-223lb
<b>Nombre Maximal de Tiroirs</b>	12	30	60	S.O.
<b>Matériaux</b>	Cadre en acier avec tiroirs et portes en polymère.			

\* Hauteur mesurée jusqu'au sommet de l'écran. Ajoutez 234,9 mm (9,25 po) pour le pont supérieur.

# Système medDispense®

## Série CS




<b>Unité – Capacité Maximale</b>	600	1 200	1 200
<b>Unité – Dimensions</b>	<p>Pleine profondeur :</p> <p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711,2mm (28po) Hauteur: 1 118mm (44po)*</p> <p>Compact :</p> <p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 1 118mm (44po)*</p>	<p>Pleine profondeur :</p> <p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711mm (28po) Hauteur: 1 981mm (78po)</p> <p>Compact :</p> <p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 1 981mm (78po)</p>	<p>Pleine profondeur :</p> <p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711mm (28po) Hauteur: 1 981mm (78po)</p> <p>Compact :</p> <p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 1 981mm (78po)</p>
<b>Poids</b>	73,5-84,8kg 162-187lb	119,7-136,1kg 264-300lb	119,7-136,1kg 264-300lb
<b>Matériaux</b>	Cadre en acier avec portes en polymère.		Cadre en acier et portes en aluminium.

\* Hauteur mesurée à la surface de travail. Ajoutez 431,8 mm (17 po) pour le pont supérieur.

# Systeme medDispense®

## Série CT

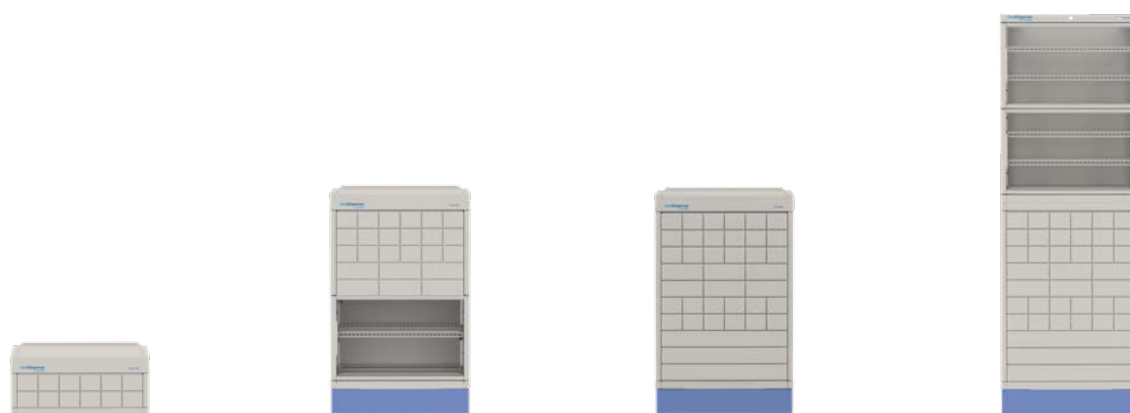

<b>Unité – Capacité Maximale</b>	112	700	800	1 400
<b>Unité – Dimensions</b>	<p>Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 355,6mm (14po)*</p>	<p><b>Pleine profondeur :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711,2mm (28po) Hauteur: 1 118mm (44po) *</p> <p><b>Compact :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 1 118mm (44po) *</p>	<p><b>Pleine profondeur :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711,2mm (28 po) Hauteur: 1 118mm (44po) *</p> <p><b>Compact :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 1 118mm (44po) *</p>	<p><b>Pleine profondeur :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 711,2mm (28po) Hauteur: 1 981mm (78po)</p> <p><b>Compact :</b> Largeur: 685,8mm (27po) Profondeur: 558,8mm (22po) Hauteur: 1 981mm (78po)</p>
<b>Poids</b>	55,8-63,5kg 123-140lb	142,9-205,5kg 315-453lb	204,6-327,5kg 451-722lb	248,6-376,9kg 548-831lb
<b>Nombre Maximal de Tiroirs</b>	12	30	60	60
<b>Matériaux</b>	Cadre en acier avec tiroirs et portes en polymère.			

\* Hauteur mesurée à la surface de travail. Ajoutez 431,8 mm (17 po) pour le pont supérieur.



## Tiroirs Séries C et CT, et Options de Rangement

### Tiroirs – Dimensions intérieures

Tiroir Type	Longueur		Largeur		Hauteur		Volume	
	mm	po	mm	po	mm	po	cm <sup>3</sup>	po <sup>3</sup>
Compartiment simple	80	3,15	59,9	2,36	35,8	1,41	172,06	10,5
Double compartiment	80	3,15	136,1	5,36	35,8	1,41	390,01	23,8
Triple compartiment	80	3,15	212,3	8,36	35,8	1,41	607,96	37,1
Largeur simple, linéaire, compact	347,7	13,69	83,3	3,28	55,1	2,17	1 596,1	97,4
Largeur simple, linéaire, pleine profondeur	500,1	19,69	83,3	3,28	55,1	2,17	2 295,83	140,1
Largeur double, linéaire, Compact	347,7	13,69	188	7,4	55,1	2,17	3 601,88	219,8
Largeur double, linéaire, pleine profondeur	500,1	19,69	188	7,4	55,1	2,17	5 919,02	316,2
1 Matriciel, profond, compact	366,3	14,42	596,1	23,47	58,2	2,29	12 700	775
1 Matriciel, profond, pleine profondeur	518,7	20,42	596,1	23,47	58,2	2,29	17 976,65	1 097
2 Matriciel, profond, compact	366,3	14,42	596,1	23,47	142	5,59	31 004,39	1 892
2 Matriciel, profond, pleine profondeur	518,7	20,42	596,1	23,47	142	5,59	43 901,04	2 679
3 Matriciel, profond, compact	366,3	14,42	596,1	23,47	225,8	8,89	49 308,78	3 009
3 Matriciel, profond, pleine profondeur	518,7	20,42	596,1	23,47	225,8	8,89	69 825,43	4 261

# Systeme medDispense®

## Série F



<b>Unité – Capacité Maximale</b>	1 248
<b>Unité – Dimensions</b>	Largeur: 545mm (21,5po) Profondeur: 520mm (20,5po) Hauteur: 2003mm (78,6po)
<b>Poids</b>	245kg (540lb)
<b>Matériaux</b>	Cadre et tiroirs en acier

## Tiroir Série F et Options de Rangement

### Tiroirs – Dimensions intérieures

Type de tiroir	Hauteur	Largeur	Nombre maximal de compartiments par tiroir
A	23mm (0,9po)	97mm (3,81po)	12
AT	49mm (1,93po)	96mm (3,78po)	12
AA	23mm (0,9po) 23mm (0,9po)	250mm (9,84po) 97mm (3,81po)	12
B	68mm (2,67po)	97mm (3,81po)	12
BB	68mm (2,67po) 68mm (2,67po)	250mm (9,84po) 97mm (3,81po)	12
C	23mm (0,9po)	164mm (6,45po)	12
CT	49mm (1,93po)	170mm (6,69po)	12
D	68mm (2,67po)	175mm (6,88po)	12
E	23mm (0,9po)	385 mm (15,15po)	12
F	68mm (2,67po)	394mm (15,51po)	12
G	120mm (4,72po)	394mm (15,51po)	12
H	175mm (6,88po)	394mm (15,51po)	12
J	170mm (6,69po)	175mm (6,88po)	12
Z	23mm (0,9po)	55mm (2,16po)	12
ZT	49mm (1,93po)	60mm (2,36po)	12

Z	Z	Z	Z
A	A	A	
AA			A
B	B	B	
BB			B
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*	AT*	AT*	
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J		J	

Tiroirs de dimensions spéciales disponibles sur demande.

\* Les tiroirs AT, CT et ZT doivent être utilisés par paires.

# Systeme medDispense®

## Série L



<b>Unité – Capacité Maximale</b>	324
<b>Unité – Dimensions</b>	Largeur: 817mm (32,17po) Profondeur: 775mm (30,51po) Hauteur: 1 025mm (40,35po)
<b>Poids</b>	440kg (970,03lb)
<b>Nombre maximal de tiroirs</b>	9
<b>Matériaux</b>	Cadre et tiroirs en acier

## Tiroir Série L et Options de Rangement

### Compartiments à plusieurs couvercles – Configurations

Module	Hauteur	Largeur	Profondeur
1x1	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	99mm (3,90po)	66mm (2,60po)
2x1	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	198mm (7,80po)	66mm (2,60po)
3x1	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	299mm (11,77po)	66mm (2,60po)
2x2	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	198mm (7,80po)	163mm (6,42po)
3x2	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	299mm (11,77po)	163mm (6,42po)
3x3	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	299mm (11,77po)	260mm (10,24po)
6x1	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	599mm (23,58po)	66mm (2,60po)
6x2	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	599mm (23,58po)	163mm (6,42po)
6x3	55mm (2,17po) 105mm (4,13po)	599mm (23,58po)	260mm (10,24po)




Les couvercles sont contrôlés par la technologie de guidage Pick-to-Light (sélection à la lumière)

- 6 canaux par tiroir.
- Hauteurs de tiroir : 100mm et 150mm.
- Tiroirs télescopiques.

# Système medDispense®

## Série M

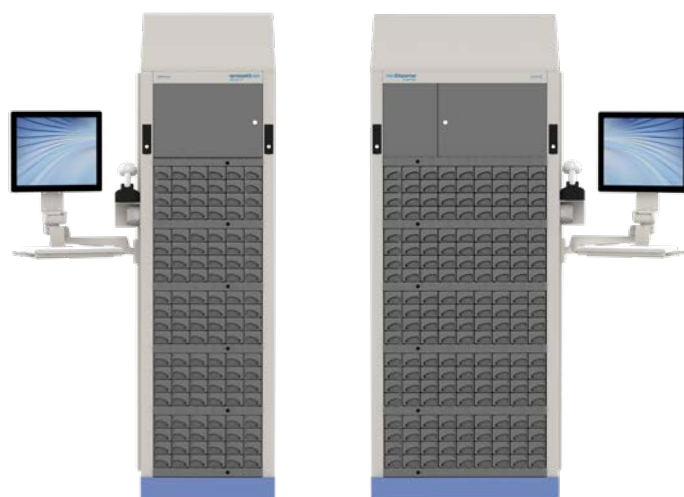

<b>Unité – Capacité Maximale</b>	1 440 Standard 2 160 TG	
<b>Unité – Dimensions</b>	<p><b>Cadre Standard :</b>                      Largeur: 544mm (21,42po)                      Profondeur: 518mm (20,39po)                      Hauteur: 2 010 mm (79,13po)</p>	<p><b>Cadre TG :</b>                      Largeur: 766mm (30,16po)                      Profondeur: 525mm (20,67po)                      Hauteur: 2 010mm (79,13po)</p>
<b>Poids</b>	140kgs 310lbs	160kgs 350lbs
<b>Matériaux</b>	Cadre en acier et tiroirs en polymère	

## Tiroir Série M et Options de Rangement

Type de tiroir	Profondeur du tiroir mm (po)			Tiroirs par section *	
	Hauteur	Largeur	Longueur <sup>(3)</sup>	Standard	TG
1x1	42 mm (1,65po)	45 mm (1,77po)	26 mm (1,02po)	24	36
2x1	42 mm (1,65po)	118 mm (4,64po)	26 mm (1,02po)	12	16+4 <sup>(1)</sup>
3x1	42 mm (1,65po)	192 mm (7,56po)	26 mm (1,02po)	8	12
2x2	96 mm (3,78po)	118 mm (4,64po)	26 mm (1,02po)	6	8+2 <sup>(2)</sup>
3x2	96 mm (3,78po)	192 mm (7,56po)	26 mm (1,02po)	4	6

(1) TG 2x1 Compart. contient 16 tiroirs 2x1 et 4 tiroirs 1x1.

(2) TG 2x2 Compart. contient 8 tiroirs 2x2 et 2 tiroirs 1x1.

(3) La distance minimale L peut être augmentée en changeant la configuration du tiroir. Maximum L = 312 mm (12,28 po).

\*Cinq sections par unité de série M.

### Exemple de configuration de cadre standard

#### Interface utilisateur ou armoire électronique à 6 niveaux

1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1

2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1

3x1	3x1
3x1	3x1
3x1	3x1
3x1	3x1

2x2	2x2	2x2
2x2	2x2	2x2

3x2	3x2
3x2	3x2

### Exemple de configuration XL

#### Interface utilisateur ou armoire électronique à 6 niveaux

1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1

2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1

3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1

2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1

3x2	3x2	3x2
3x2	3x2	3x2

# Systeme medDispense®


## Série V



<b>Unité – Capacité maximale</b>	720	720
<b>Unité – Dimensions</b>	<p><b>Casier :</b>                      Largeur: 1 093mm (43po)                      Profondeur: 500mm (19,7po)                      Hauteur: 2 030mm (80po)</p>	<p><b>Casier :</b>                      Largeur: 1 093mm (43po)                      Profondeur: 500mm (19,7po)                      Hauteur: 2 030mm (80po)</p>
<b>Poids</b>	175kg (386lb)	175kg (386lb)
<b>Matériaux</b>	Cadre en acier avec portes en polycarbonate	Cadre et portes en acier



## Portes Série V et Options de Rangement

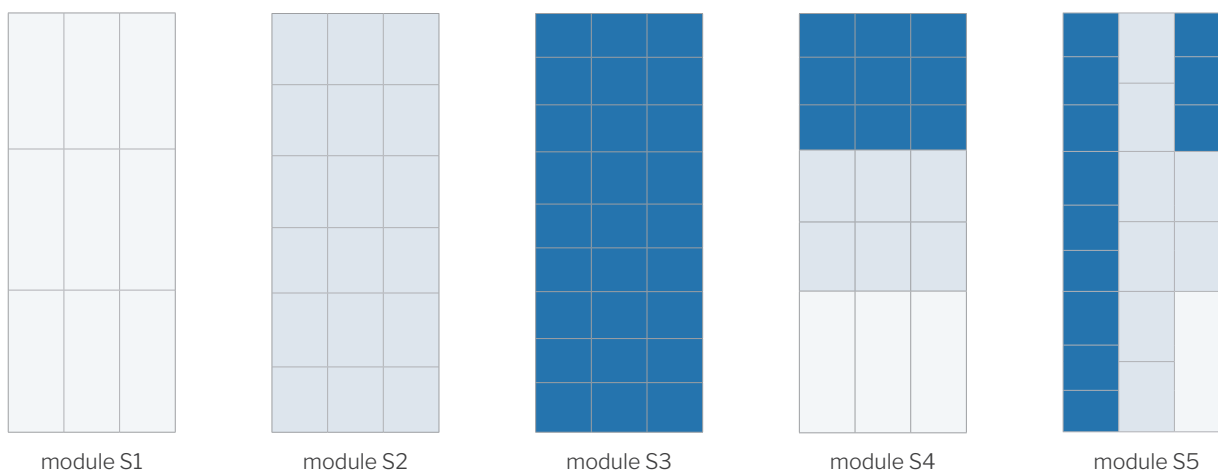

\* 5 types d'unités disponibles, chacune avec son nombre de compartiments.

### Porte – Dimensions

Porte – Taille	Petit	Moyen	Grand
Hauteur	154 mm (6,1po)	254 mm (10po)	515 mm (20,3po)
Largeur	320 mm (12,6po)	320 mm (12,6po)	320 mm (12,6po)
Profondeur	480 mm (19po)	480 mm (19po)	480 mm (19po)

### Configuration trois casiers

Type	Configuration
S1	9 grands casiers
S2	18 casiers moyens
S3	27 petits casiers
S4	9 petits casiers, 6 casiers moyens, 3 grands casiers
S5	12 petits casiers, 8 casiers moyens, 1 grand casier

\* Casiers en acier offerts dans toutes les dispositions. Casiers avant transparents offerts seulement dans les dispositions S2, S3 et S4.

## medDispense® Accessoires.

Les équipements changent au fil du temps; notre gamme d'accessoires peut être ajoutée ou supprimée selon vos besoins.



### Verrouillage à distance

Ajouter un contrôle d'accès aux armoires autres que medDispense®.




### Verrouillage à distance avec surveillance de la température

Verrou de contrôle d'accès au réfrigérateur externe avec surveillance de la température, intégré au logiciel medLogic®.




### Bac de retour externe

Gérez les médicaments retournés avec le bac de retour externe pouvant être monté sur le pont supérieur. Sur les séries C, CS et CT.

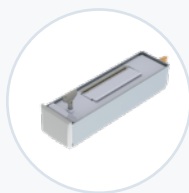

### Tiroir de retour

Tiroir de retour intégré au système de tiroirs offrant plus de sécurité lors du processus de retour. Disponible pour les armoires de séries C et CT en largeur simple ou double.

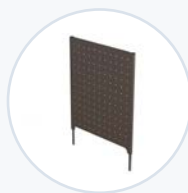


### Pont supérieur

Augmentez l'espace de stockage pour toutes les unités. Disponible en pleine hauteur et en hauteur standard sur les séries C, CS et CT.



### Lecteur de code à barres

Flux de travail amélioré grâce à un lecteur de codes à barres sans fil intégré.

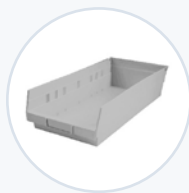

### Bacs de stockage en vrac

Disponible pour les séries C, CS et CT en plusieurs tailles pour les lieux d'approvisionnement.



Pour se conformer aux lois internationales, des essais d'homologation ISO et CSA sont en cours

## Service rapide, réactif et courtois.

Nous nous engageons à vous fournir un soutien consultatif et réactif tout au long de notre partenariat.



### CONCEPTION ET DISPOSITION

Votre responsable de compte expérimenté vous aidera à concevoir une configuration adaptée à vos besoins en matière de stockage des médicaments et de flux du travail.



### INSTALLATION ET FORMATION

L'équipe de services professionnels de TouchPoint Medical sera présente tout au long de la mise en place, de l'installation, de la formation et de la mise en œuvre.



### SOUTIEN TECHNIQUE

L'équipe responsable du soutien technique à TouchPoint Medical fournit une assistance téléphonique depuis ses locaux au monde entier.



### MISES À JOUR LOGICIELLES GRATUITES

Des améliorations logicielles sont fournies gratuitement aux clients et annoncées dès leur publication.



### GARANTIE


Garantie standard de 5 ans sur chaque armoire.



Communiquez avec un représentant de TouchPoint Medical pour en savoir plus et discuter des accessoires qui conviennent à votre gestion des médicaments. Visitez [touchpointmed.com/contact](https://touchpointmed.com/contact) pour communiquer avec notre représentant local.

## Une Entreprise Mondiale Avec Une Touche Locale

TouchPoint Medical apporte un réseau mondial de fabrication, de qualité et d'ingénierie à la pointe du secteur médical. De la qualité et du rendement à l'esthétique et à l'ergonomie, nous savons que les petites attentions font toute la différence pour nos clients. Nous fournissons une technologie médicale et des services axés sur le client à des milliers d'hôpitaux et d'établissements de santé dans le monde.

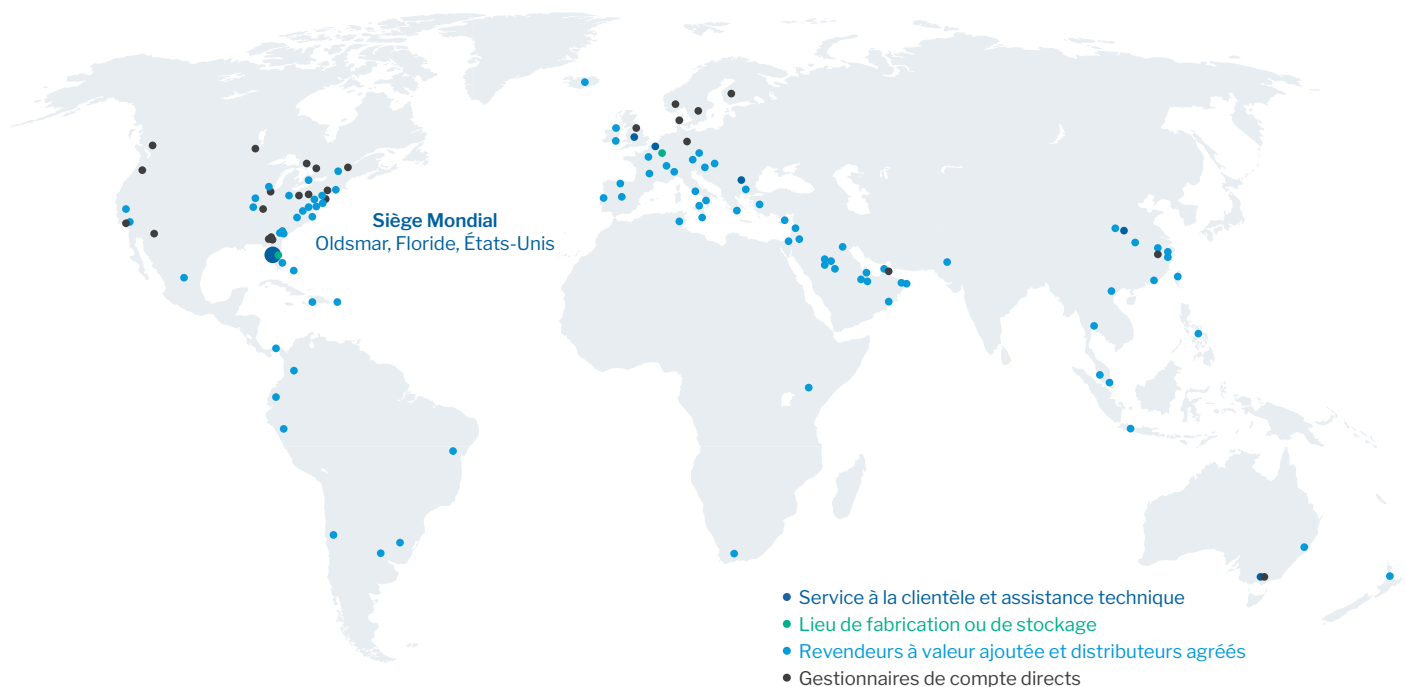

**Siège Mondial et Amériques**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Oldsmar, FL, États-Unis  
Tél. : (1) 800 947 3901

**Siège Européen**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Melsele, Belgique  
Tél. : (32) 3 568 33 00

**China, Taiwan, Japan, Korea, Hong Kong**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Shanghai, Chine  
Tél. : (86) 1361 1680 312

**Royaume-Uni**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Rugby, Royaume-Uni  
Tél. : (44) (0) 844 576 1247

**Moyen-Orient / Afrique**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. : (971) 55 5963 092

**Asie du Sud-Est, AUS / NZ**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Victoria, Australie  
Tél. : (61) 3 9330 5050

**Norvège, Suède, Danemark, Finlande**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Tranby, Norvège  
Tél. : (47) 31 90 97 60

info@touchpointmed.com · touchpointmed.com

*BRINGING CARE FORWARD.™*